

Precauciones e instrucciones de uso

El limpiador no estéril debe utilizarse en combinación con una solución estéril multiuso para lentes de contacto o de enjuague.

Lávese las manos minuciosamente antes de retirar las lentes de contacto de los ojos o del estuche donde las guarda. Séquese las manos con una toalla limpia.

Rompa el precinto desenroscando la tapa del frasco.

Agite el frasco antes de usarlo.

Inmediatamente después de retirar las lentes, límpielas con dos o tres gotas del limpiador.

Frote la lentilla suavemente entre la palma de la mano y el dedo durante 15 segundos.

Después de limpiarlas, enjuague ambos lados de la lentilla con una solución estéril multiuso para lentes de contacto o de enjuague.

Tras el enjuague, se puede insertar las lentes.

Cierre bien el frasco inmediatamente después del uso.

Condiciones de conservación

Una vez abierto, utilice este producto en un plazo de 2 meses.

Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. (Véase la imagen A)

Advertencias y contraindicaciones

No se inserte las lentes directamente en el ojo después de usar el limpiador sin enjuagar antes la lentilla con una solución estéril para el cuidado de las lentes de contacto.

Deje de utilizar las lentes y consulte al médico cuando sufra irritación o una infección ocular.

Si un médico le ha prescrito medicamentos para los ojos, consulte a su oftalmólogo o especialista en lentes de contacto antes de usar el medicamento junto con las lentes de contacto.

No utilice el producto si el envase está dañado. (Véase la imagen B)

No utilice el producto después de la fecha de caducidad.

No cambie su sistema de cuidado de lentes de contacto sin consultar a un especialista en lentes de contacto.

En caso de sufrir algún problema grave de salud en relación con este producto sanitario, deje de utilizarlo e informe al fabricante legal y a las autoridades sanitarias nacionales.